


# Directives d'assemblage

Pièces :

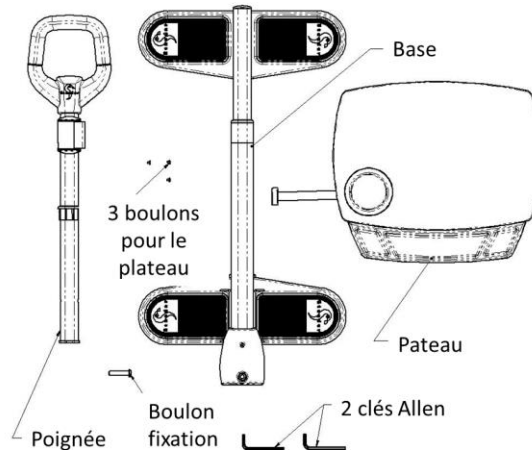

1<sup>re</sup> étape :

Levez le **tube vertical de la base**, tel qu'illustré à la Figure 1, insérez le **boulon de fixation** dans le grand trou du socle en plastique au bas du **tube vertical de la base** et serrez le **boulon de fixation** à l'aide la **clé Allen**.

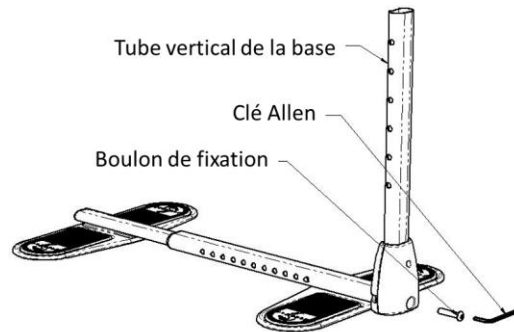


Figure 1

2<sup>e</sup> étape :

Assurez-vous de bien assembler la **poignée** dans le **tube vertical de la base** en y insérant complètement la **bague de raccordement**.

Pour ce faire, insérez la **poignée** jusqu'à ce que le **bouton-poussoir à ressort** soit plus bas que tous les trous dans le tube vertical de la base.

Continuez de pousser sur la **poignée** jusqu'à ce que la **bague de raccordement** soit complètement insérée dans le **tube vertical de la base**.

Une fois que la **bague de raccordement** est bien insérée, réglez la hauteur de la poignée en appuyant sur le **bouton-poussoir à ressort** et en relevant ou en abaissant la **poignée**.

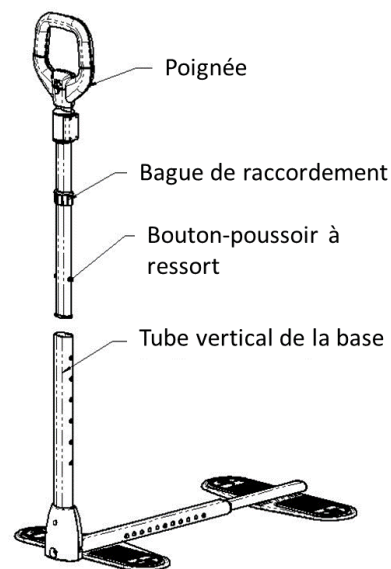


Figure 2

### 3<sup>e</sup> étape : (Accessoire facultatif)

Si vous désirez utiliser le plateau, placez le **crochet du plateau** sur le support de la **poignée**, tel qu'illustré aux Figures 3A et 3B.

#### NIVELLEMENT DU PLATEAU

**IMPORTANT** : Après avoir accroché le plateau sur le support de la poignée, il peut être nécessaire de visser le boulon central de réglage pour niveler le plateau.

Nivelez le plateau en utilisant la **petite clé Allen** pour visser le **boulon central de réglage** dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever le plateau et dans le sens contraire pour le rabaisser. Une fois que le plateau est nivelé, serrez les 2 boulons de calage, tel qu'illustré à la Figure 3B.

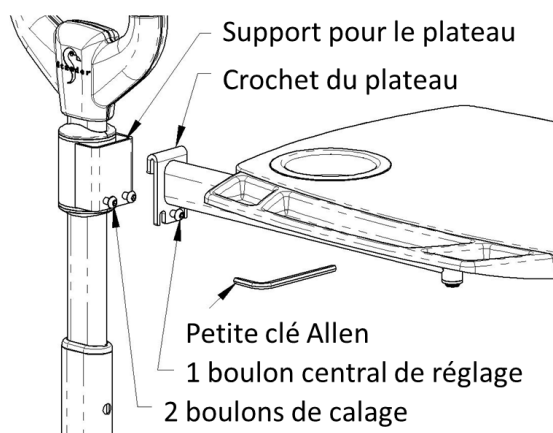


Figure 3A

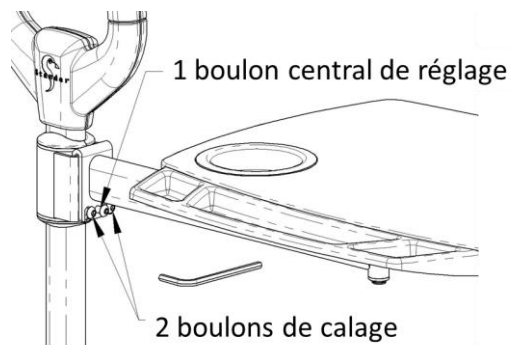


Figure 3B

### 4<sup>e</sup> étape :

Placez le produit assemblé le long du canapé ou de la chaise de votre choix.

Réglez la longueur du **tube réglable de la base** de sorte que les pieds du canapé ou de la chaise soient placés au centre des coussinets du **tube réglable de la base** et du **tube stationnaire de la base**, tel qu'illustré aux Figures 4 et 5.

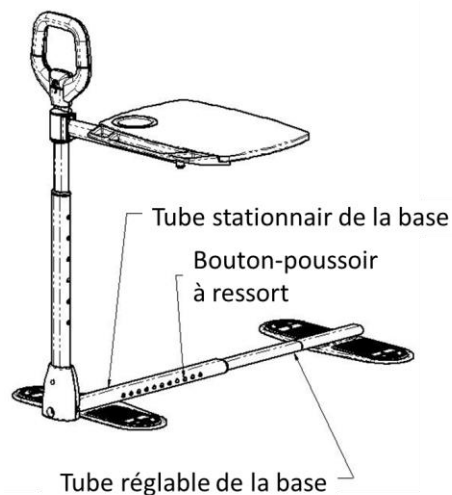
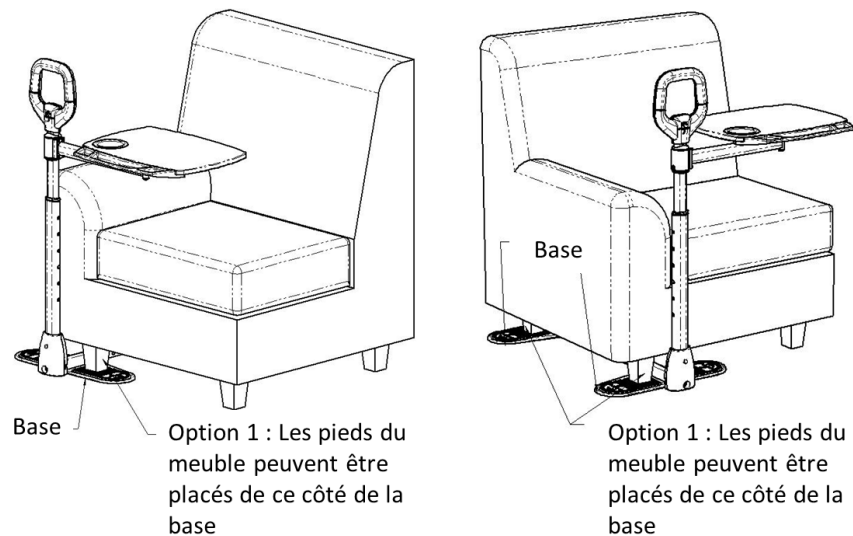


Figure 4

## 5<sup>e</sup> étape :

L'espace entre les tubes stationnaire et réglable de la base doit être réglé de sorte que les pieds du meuble doivent être posés au centre des coussinets en caoutchouc avant et arrière de la base, tel qu'illustré à la Figure 5.



**Figure 5**

Option 1 : Les pieds du meuble peuvent être placés de ce côté de la base

Option 2 : Les pieds du meuble peuvent être placés de ce côté de la base

**Remarque :** Les pieds du canapé ou de la chaise devraient être placés au centre des coussinets de la base ET aussi près que possible des tubes stationnaire et réglable de la base.