

## Directives d'assemblage et d'installation

1. Retirez toutes les pièces de la boîte et familiarisez-vous avec chacune d'entre elles. Retirez les tiges de blocage tel qu'illustré à la Figure 1.

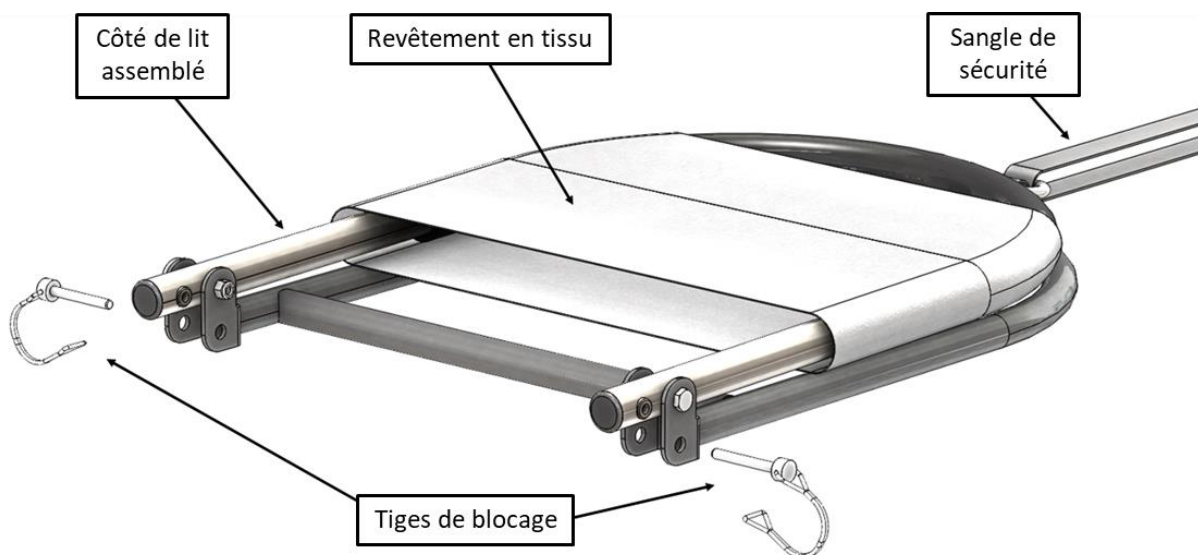


Figure 1

2. Relevez le tube de la poignée afin de former un angle de 90 degrés avec le tube de la base, tel qu'illustré à la Figure 2.
3. Alignez les trous au bas du tube de la poignée avec les trous de la fixation, tel qu'illustré à la Figure 2.
4. Réinsérez les tiges de blocage dans les trous alignés afin de fixer fermement le tube de la poignée dans la bonne position, tel qu'illustré à la Figure 2.

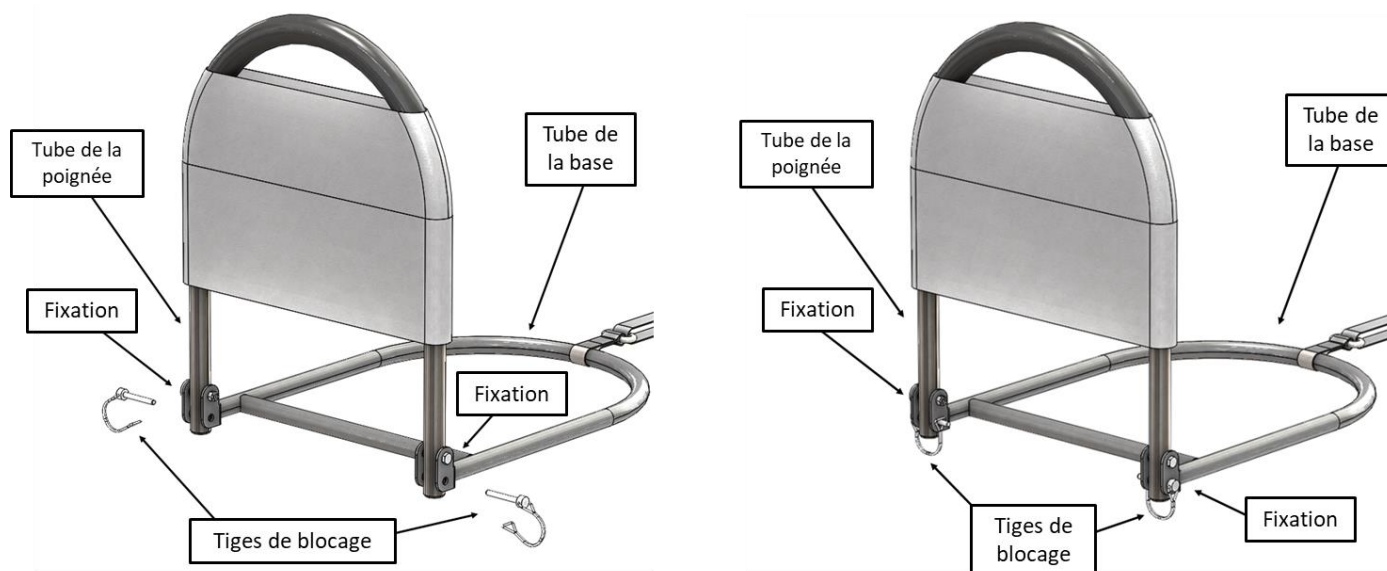


Figure 2

5. Une fois que les tiges de blocage ont été réinsérées dans les trous alignés, accrochez la boucle du câble à l'extrémité de chaque tige, tel qu'illustré à la Figure 3.

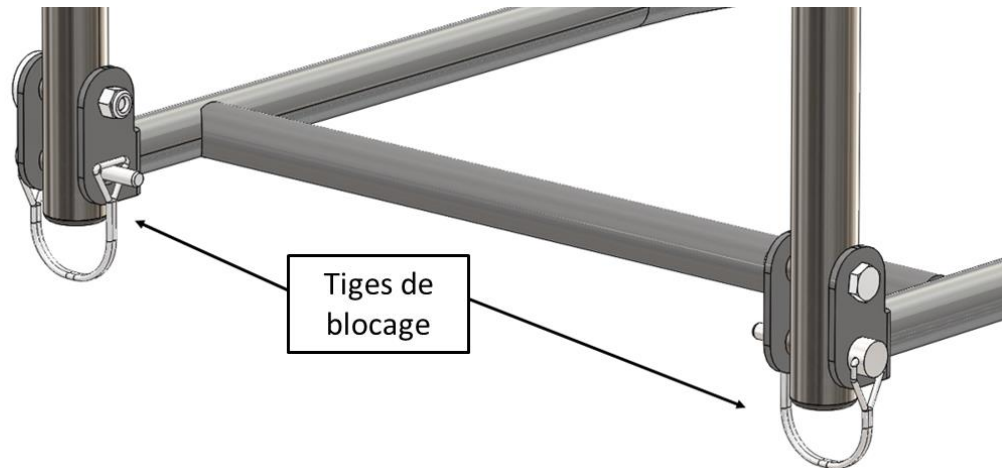


Figure 3

6. **Mise en garde concernant le risque de coincement :** Attachez la SANGLE DE SÉCURITÉ au cadre du lit, tel qu'illustré à la Figure 4. Détachez la sangle et passez-la autour du cadre de lit, puis rattachez-la. Resserrez bien la sangle pour vous assurer que le produit est fermement fixé contre le matelas. N'installez PAS le produit sans bien fixer la SANGLE DE SÉCURITÉ autour du cadre de lit, tel qu'illustré à la Figure 4. Pour toute question, appelez Stander au (800) 506-9901 ou (435) 755-0453.

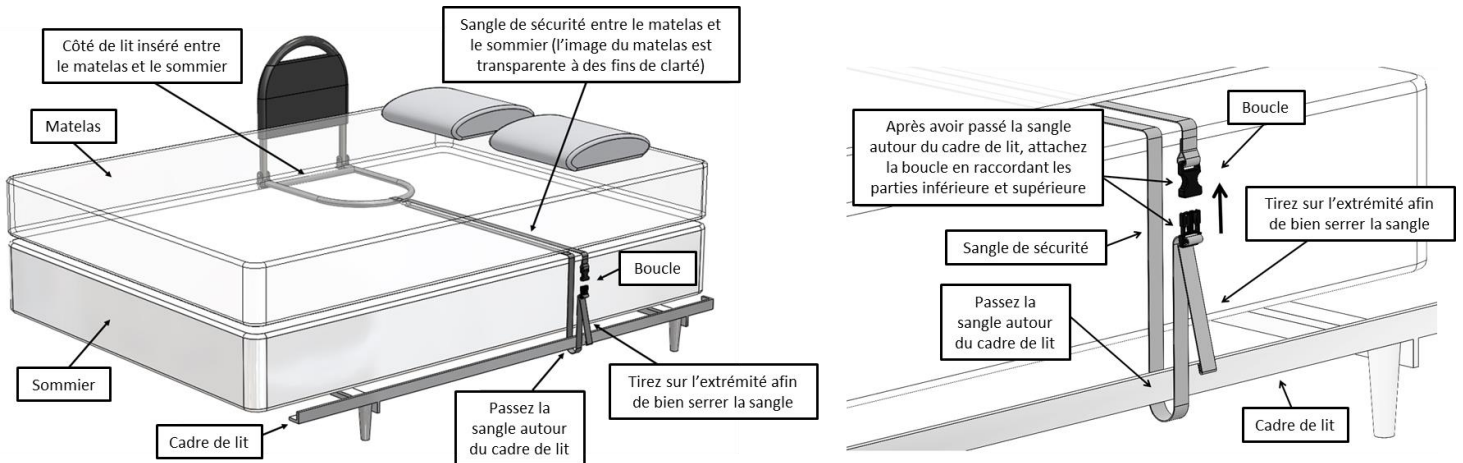


Figure 4

7. **Mise en garde concernant le risque de coincement :** Installez le revêtement en tissu par-dessus la poignée, tel qu'illustré à la Figure 5. N'utilisez PAS le produit sans installer le revêtement en tissu. NE modifiez D'AUCUNE façon le revêtement en tissu, car il contribue à prévenir le coincement (consultez les **Directives pour prévenir les risques de coincement** jointes aux présentes instructions).

REMARQUE : Assurez-vous que le produit est placé à au moins 32 cm (12,5 po) de la tête du lit pour prévenir les risques de coincement (consultez les **Directives pour prévenir les risques de coincement** jointes aux présentes instructions). En réglant la hauteur de la poignée à au moins 10 cm (4 po) au-dessus de la surface du matelas, on réduit ainsi le risque d'enjambement du produit.

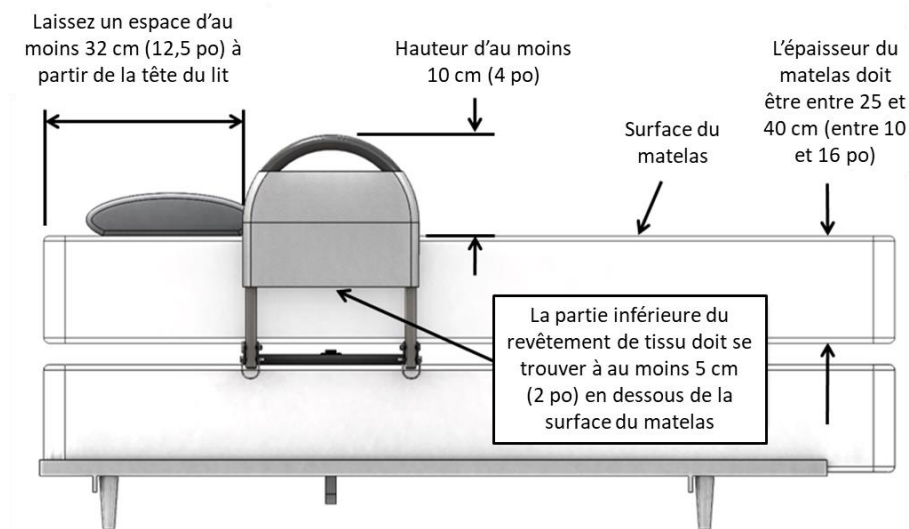


Figure 5

- Il est important que le Côté de lit soit bien fixé contre le matelas. La sangle de sécurité doit être passée autour du cadre de lit et être bouclée du côté opposé du lit, tel qu'illustré à la Figure 6.

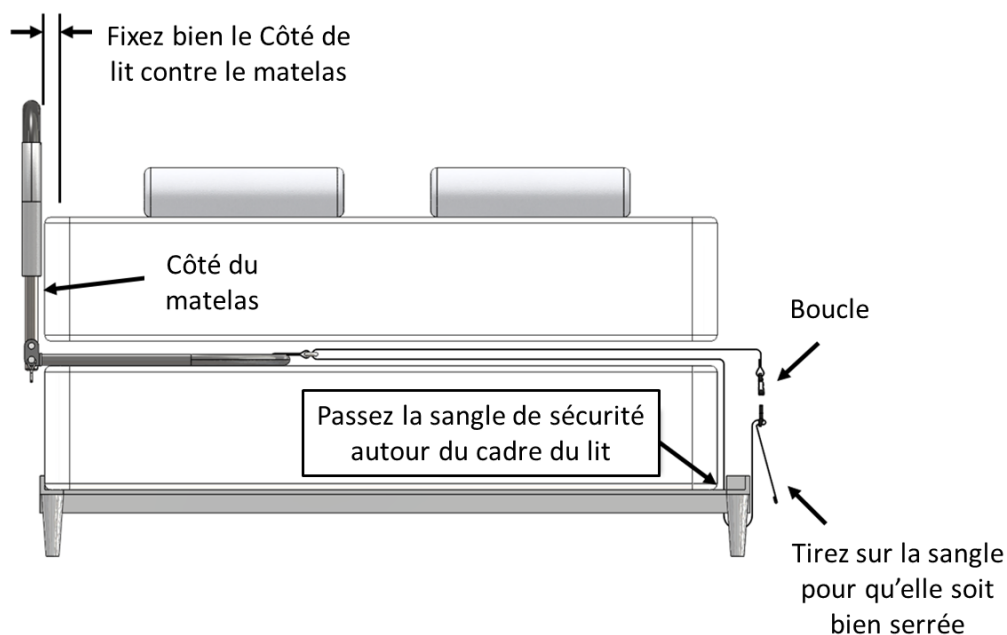


Figure 6