

## OMNI TRAY ORGANIZER COMPARTMENT™

Schritt 1: Entfernen Sie das vertikale Trägerstützrohr

Schritt 2: Entfernen Sie die vorhandene Kunststoffendkappe

vom vertikalen Basisrohr. Schritt 3: Schieben Sie die

Gummimanschette auf das vertikale Basisrohr

Schritt 4: Schieben Sie den Organizer in der gewünschten

Richtung auf die Gummimanschette. Schritt 5: Setzen Sie die

vorhandene Kunststoff-Endkappe wieder auf das vertikale

Basisrohr. Schritt 6: Setzen Sie das vertikale Fachstützrohr

wieder ein

Vertikal Tray

Unterstützung Rohrunter

Vertikale Rohr

