

OMNI TRAY ORGANIZER COMPARTMENT™

Paso 1: retire el tubo de soporte de la bandeja vertical

Paso 2: Retire la tapa de plástico existente del tubo vertical de la base

Paso 3: Deslice la funda de goma sobre el tubo vertical de la base

Paso 4: Deslice el organizador sobre la funda de goma en la dirección deseada

Paso 5: Vuelva a colocar la tapa de plástico existente en el tubo vertical de la base

Paso 6: Vuelva a insertar el tubo de soporte de la bandeja vertical

Bandeja vertical Soporte

Tubo Base Tubo vertical

