

OMNI TRAY ORGANIZER COMPARTMENT™

Étape 1: Retirez le tube de support du plateau vertical

Étape 2: Retirez le capuchon en plastique existant du tube

vertical de base Étape 3: Faites glisser le manchon en

caoutchouc sur le tube vertical de base

Étape 4: Glissez l'organiseur sur le manchon en caoutchouc

dans la direction souhaitée Étape 5: Remettez le capuchon en

plastique existant sur le tube vertical de base Étape 6:

Réinsérez le tube de support du plateau vertical

Vertical Plateau support

Tube base verticale Tube

