

## OMNI TRAY ORGANIZER COMPARTMENT™

Passaggio 1: rimuovere il tubo di supporto del vassoio verticale

Passaggio 2: rimuovere il tappo di chiusura in plastica

esistente dal tubo verticale di base Passaggio 3: far scorrere il

manicotto di gomma sul tubo verticale di base

Passaggio 4: far scorrere l'organizzatore sul manicotto di

gomma nella direzione desiderata Passaggio 5: riposizionare

il cappuccio terminale in plastica esistente sul tubo verticale

di base Passaggio 6: reinsertire il tubo di supporto del vassoio

verticale

Vertical Tray Supporto

Tubo Base verticale del

tubo

