

HANDY HANDLE™

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Der handliche Griff ist entworfen , um sicher zu helfen eine Person mit einem Gewicht von bis zu 350 Pfund. Die einzige Funktion von der Handy - Handle ist auf beim Ziehen einer Person in eine stehende Position von einem behilflich sein Stuhl, Bett, Bank oder anderen Standardsitz. Der Handy-Griff darf niemals verwendet werden, um eine Person auf dem Boden oder auf dem Boden hochzuziehen. Der Handgriff darf niemals verwendet werden, um jemanden hochzuziehen, der auf dem Boden oder auf dem Boden liegt. Beide Personen, die dieses Produkt verwenden, müssen über ausreichende Mobilität verfügen . Arm und Griffstärke. Beide Personen, die dieses Produkt verwenden, müssen eine vollständige Traktion zwischen beiden Füßen und dem Boden haben. Halten Sie den Griff bis zum vollständigen Stehen aufrecht , um Stürze oder Verletzungen zu vermeiden . Verwenden Sie Handy Griffe nicht bei Personen , die ohne Hilfe nicht alleine stehen können. Bitte erläutern Sie diese Warnungen allen Personen , die das Produkt verwenden möchten. Geeignet zum Reinigen mit herkömmlichen Haushaltsreinigern oder Alkohol (70% Isopropanol).

ANFAHRT

1. Beide Personen greifen mit beiden Händen nach dem Handygriff .
2. Gehen Sie zur Kante des Stuhls, des Bettes, der Bank oder des Standardsitzes .
3. Während Sie festhalten, sollte sich die sitzende Person nach vorne beugen .
4. Die Füße beider Personen sollten eine Traktion mit dem Boden haben und „bereit, gesetzt, los“ sagen und auf dem Wort „los“ stehen.