

## HANDY HANDLE™

### SAFETY INFORMATION DE SÉCURITÉ

La poignée Handy Handle est conçue pour venir en aide aux personnes pesant jusqu'à 160 kg (350 lb). La seule fonction de la poignée Handy Handle est d'aider une personne à se lever d'un fauteuil, d'un lit, d'un banc ou de toute autre chaise ordinaire. La poignée Handy Handle ne devrait jamais servir à relever une personne qui est assise par terre. La poignée Handy Handle ne devrait jamais servir à relever une personne qui est allongée au sol. Les deux personnes utilisant cet accessoire doivent être suffisamment mobiles et avoir une force des bras et de préhension suffisante. Les deux personnes utilisant cet accessoire doivent maintenir les deux pieds fermement plantés au sol. Gardez les mains sur la poignée jusqu'à ce que la personne soit complètement debout pour prévenir les chutes et les blessures. Il ne faut pas utiliser la poignée Handy Handle à proximité d'objets dangereux comme les objets tranchants ou pointus. N'utilisez pas la poignée Handy Handle avec une personne qui ne peut pas se tenir debout toute seule. Veuillez expliquer ces mises en garde à toute personne qui songe à utiliser cet accessoire. Peut être nettoyée avec un produit de nettoyage ordinaire ou de l'alcool (isopropanol à 70 %)

### INSTRUCTIONS

1. Les deux personnes doivent tenir la poignée Handy Handle avec les deux mains.
2. Se déplacez sur le bord de la chaise, du lit, d'un banc ou d'un siège standard.
3. Tout en tenant fermement la poignée, la personne assise doit se pencher en avant.
4. Les pieds des deux personnes doivent être en traction contre le sol et elles doivent dire « à vos marques, prêts, partez » et être prêtes à partir en entendant « partez ! ».