

WALKER REPLACEMENT FRONT WHEELS™

Ersatzradbaugruppe

1. Entfernen Sie die Schraube, die Mutter und das alte Rad mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel vom vorhandenen Gehgerät. Hinweis: Beachten Sie die Montagerichtung von Schraube und Mutter, bevor Sie sie abnehmen.
2. Ersetzen Sie das alte Rad durch ein neues Rad und setzen Sie die Schraube und Mutter wie ursprünglich zusammengebaut wieder zusammen.

Stationäre Montage

Vorhandene

Mutter

Vorhandene

Schraube

Inklusive
Inbusschlüssel

