

WALKER REPLACEMENT FRONT WHEELS™

Conjunto de rueda de repuesto

1. Retire el perno, la tuerca y la rueda vieja del andador existente con la llave Allen de cabeza incluida . Nota: Observe la dirección ensamblada del perno y la tuerca antes de quitarlos.
2. Reemplace la rueda vieja con una rueda nueva y vuelva a ensamblar el perno y la tuerca como se ensambló originalmente .

Asamblea
estacionaria

Tuerca existente

Perno existente

Incluye llave Allen

