

WALKER REPLACEMENT FRONT WHEELS™

Ensemble de roue de rechange

1. Retirez le boulon, l'écrou et l'ancienne roue du déambulateur existant à l'aide de la clé Allen fournie. Remarque: Observez la direction assemblée du boulon et de l'écrou avant de les retirer.
2. Remplacez l'ancienne roue par une nouvelle roue et réassemblez le boulon et l'écrou tel qu'assemblé à l'origine.

Assemblage
stationnaire

Écrou existant

Boulon existant

Clé à tête Allen
incluse

