


ANWEISUNGEN FÜR DEN AUSTAUSCH DER SKID:

1. Entfernen Sie vorhandene Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel.
2. Ziehen Sie den alten Skid ab und entfernen Sie die vorhandenen Muttern vom alten Skid.
3. Setzen Sie die vorhandenen Muttern wieder in den neuen Skid ein.
4. Schieben Sie den neuen Skid in das Gehbein und setzen Sie die vorhandenen Schrauben wieder ein. Ziehen Sie die vorhandenen Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest.

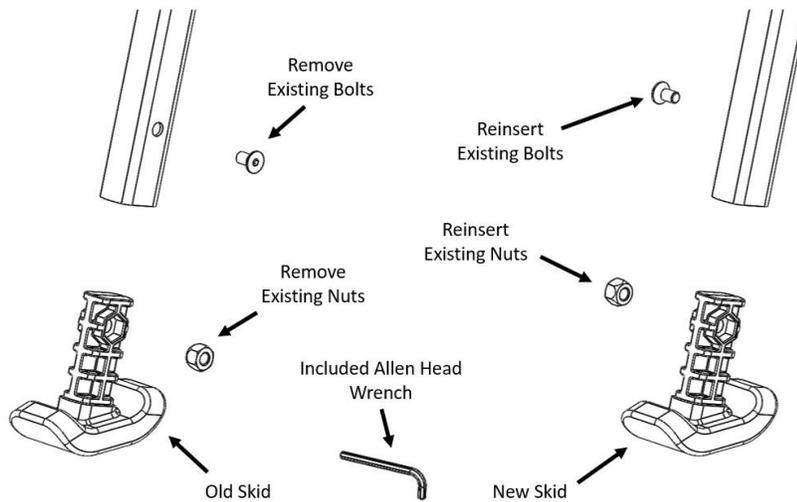

Skid Replacement V 1.0