


ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLO SKID:

1. Rimuovere i bulloni esistenti utilizzando la chiave a brugola inclusa.
2. Estrarre il vecchio pattino e rimuovere i dadi esistenti dal pattino vecchio.
3. Reinserrare i dadi esistenti nel nuovo pattino.
4. Inserire il nuovo pattino nella gamba del camminatore e reinserrare i bulloni esistenti. Stringere i bulloni esistenti con la chiave a brugola inclusa.

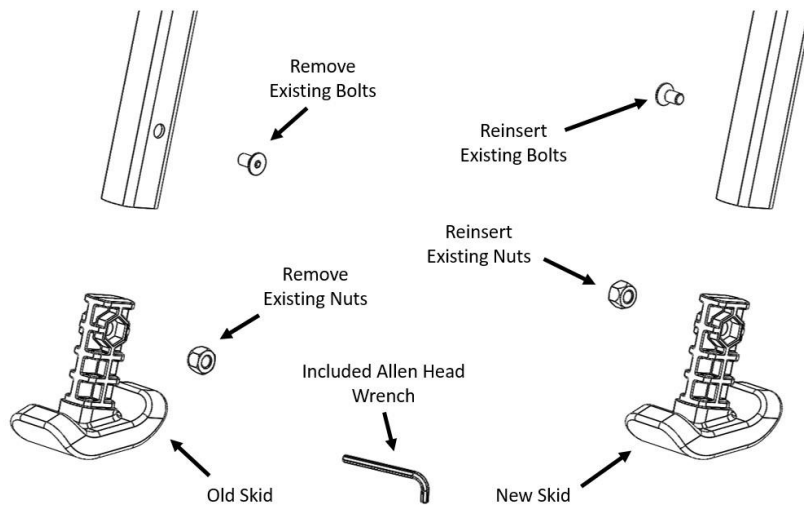

Skid Replacement V 1.0