

## UNIVERSAL STANDING HANDLE™

### Informations sur la sécurité

La pratique poignée est conçue pour en toute sécurité aider une personne pesant jusqu'à à 350 livres. La seule fonction de la pratique poignée est d' aider à tirer une personne à une position debout à partir d' une chaise, lit, banc ou autre siège standard. La poignée pratique ne doit jamais être utilisée pour tirer une personne en position assise sur le sol ou le sol. La poignée pratique ne doit jamais être utilisée pour tirer une personne allongée sur le sol ou le sol. Les deux personnes utilisant ce produit doivent avoir une mobilité, un bras et une adhérence suffisants. Les deux personnes utilisant ce produit doivent avoir une traction complète entre les deux pieds et le sol. Maintenez l'adhérence jusqu'à ce qu'il soit complètement debout pour éviter les chutes ou les blessures. Les poignées pratiques ne doivent pas être utilisées à proximité d'objets dangereux, y compris, mais sans s'y limiter, les objets tranchants ou fragiles. N'utilisez pas les poignées pratiques avec toute personne qui ne peut pas se débrouiller seule sans assistance. Veuillez expliquer ces avertissements à toute personne prévoyant d'utiliser le produit. Convient pour nettoyer avec des nettoyeurs ménagers courants ou de l'alcool (70% d'isopropanol).

### Directions

1. Les deux personnes utilisant la poignée pratique saisissent les poignées à deux mains.
2. Déplacez-vous vers le bord de la chaise, du lit, de la banquette ou du siège standard .
3. Tout en tenant fermement la poignée pratique , la personne assise doit se pencher en avant.
4. Assurez-vous que les pieds des deux personnes adhèrent au sol.
5. Les deux personnes utilisant la poignée doivent dire "prêt, partez , partez" et commencez à vous tenir sur le mot "allez".