

CouchCane Assembly Instruction Sheet

パーツリスト :

ステップ 1: 図1に示すように、直立パイプを垂直位置に回転させ、直立ボルトを直立パイプの下部にあるプラスチックカバーの大きな穴に挿入し、レンチで直立ボルトを締めます。

Figure 1

Figure 2

ステップ 2: ハンドルアセンブリを直立固定チューブに適切に取り付けるには、ハンドルアセンブリのソケットを直立固定チューブに完全に挿入する必要があります。

これは、ハンドルアセンブリを完全に挿入して、バネ仕掛けのボタンが直立した固定チューブのすべての穴を通過するようにすることで実現できます。ハンドルアセンブリのソケットが直立した固定チューブに完全にかみ合うまで、ハンドルアセンブリを押し下げ続けます。

ハンドルアセンブリソケットが正しく取り付けられたら、バネ仕掛けのボタンを押してハンドルアセンブリを上下に動かして、ハンドルアセンブリの高さを目的の高さに調整します。

ステップ 3: 組み立てた製品を、使用する予定のソファまたは椅子の下に置きます。

ソファまたは椅子の家具の脚がベース調整チューブと固定ベースチューブの両方のゴムパッドの中央にくるように、ベース調整チューブを適切な長さに調整します（図4および図5を参照）。

Figure 4

ステップ 4: 固定ベースチューブとベースアダプターチューブが適切な間隔で配置されていることを確認して、家具の脚が製品ベースのゴムパッドの前面と背面の中央にくるようにします（下の図5を参照）。

Figure 5

注意 : 椅子またはソファの家具の脚は、製品ベースのゴム製パッドの中央に配置し、固定ベースチューブとベース調整チューブのできるだけ近くに配置する必要があります。

警告 : この製品を使用する前に必ずお読みください。

1. Stander Medical Assist製品は、障害者向けに設計され、最小限のパフォーマンスを提供するデバイスです。
2. CouchCaneが正しく取り付けられていないと、怪我をする可能性があります。Stander Inc.は、安全な製品を提供し、事故を防ぐ方法をユーザーに通知することに取り組んでいます。

- ✓ 指示に示されているように、CouchCaneを定期的にチェックして、椅子またはカウチの脚がベース脚の中央にあり、メインベースチューブにできるだけ近いことを確認します。
 - ✓ リスクの高いユーザーには、追加のセキュリティ対策を講じる必要があります。これらのユーザーには、精神的に意識のないユーザー（投薬中のユーザーを含む）、助けを得るために他の誰かの監督が必要なユーザーが含まれます。
 - ✓ これらの注意事項について懸念や質問がある場合は、スタンダー（1-800-506-9901）までお電話ください。
3. 病気やけがをしたり、バランスや立ったり座ったりする能力を妨げる薬を服用している場合は、この製品を使用する前にまず医師に相談する必要があります。製品を適切に使用しないと、重大な怪我や損傷につながる可能性があります。
 4. 製品は人の全重量を支えてはなりません。この製品の目的は、提供することのみで座ったり立ったりするときのバランスとサポート。
 5. 製品が適切に組み立てられていることを確認するために、製品の指示に注意深く従う必要があります。指示に従わないと、製品のユーザーに重大な傷害をもたらす可能性があります。
 6. 子供は製品にぶら下がったり遊んだりしないでください。

限定的保証

ブランドのStander製品をご購入いただきありがとうございます。それがあなたの日常生活を楽にしてくれることを願っています。保護のために、次の保証書をお読みください。Stander, Inc. は、この製品が購入日から1年間、材料および/または製造上の欠陥がないことを最初の購入者に保証します。Standers, Inc. は、保証期間中、材料または製造上の欠陥を無料で修正します。

元の購入者は送料を支払う必要があります。すべての交換部品は新品であり、元の保証の残りの期間、または出荷日から30日間のいずれか長い方の期間保証されます。購入した元の方は、欠陥を書き留めて、Stander, Inc. に手紙を郵送しなければなりません。これは、保証期間中に修正する必要があります。この保証は譲渡できず、通常の使用にのみ適用されます。スタンダーは送料をカバーしていません。料金は払い戻すことができます。

保証の対象外：

- 小売業者への最初の配送と一致しない出荷中の損傷。
- 不正な添付または変更によって引き起こされた損傷。
- 製品が設計または意図された目的以外の目的で製品を使用することによって引き起こされた損傷。
- その他の乱用、取り扱いの誤り、または誤用によって引き起こされた損傷。

いかなる状況においても、Standers, Inc. は、この限定保証の違反、契約の違反、または厳格な責任から生じる特別な、偶発的な、または結果的な損害について責任を負いません。ここで

説明されている以上の保証はありません。明示または黙示を問わず、他のすべての保証（商品性または特定の目的への適合性の黙示の保証を含む）は、これにより除外されます。一部の州では、暗黙の保証期間の制限を許可していません。したがって、上記の制限が適用されない場合があります。この保証はあなたに特定の法的権利を与えます、そしてあなたはまた州ごとに異なる他の権利を持っているかもしれません。この保証に基づくサービスを受けるには、Stander, Inc.（2410 Heritage Dr、Logan、Utah 84321）に連絡してください。

この製品を使用する前に、安全上の注意と指示をお読みください。