

## CarCaddie Instructions

CarCaddieの端がウィンドウの上部を包み込むように、ウィンドウをロールダウンします。所定の位置にはめ込み、ストラップの長さを調整して、開いて着席するようにします。CarCaddieをフレームに沿って移動し、最大限のサポートを得るのに最も効果的な場所を見つけます。

### 注意

CarCaddieは、人々が立ち上がって座ったり、物を運ぶときに役立つように開発されました。ただし、人の体重を支えたり支えたりするには設計されていません。CarCaddieの最大耐荷重は45キログラムです。定格重量を超えないようにしてください。重大な損傷や怪我を引き起こす可能性があります。リフトとして使用する場合、CarCaddieは、製品の最大定格をサポートできる安全な物体にのみ取り付ける必要があります。使用する前に、ハンドルを引いて安全に接続されていることを確認してください。