

Furniture Risers

アイテムのリスト :

Item-1	8	フォームパッド
Item-2	4	7.6 cm ライザー
Item-3	4	10.2 cm ライザー
Item-4	8	滑り止めストリップ

マニュアル:

1. フォームパッド (Item-1) を中央に配置し、(Item-2) と (Item-3) のくぼみ領域 (A) と (B) に適用します。
2. この製品は4つの異なる方法で使用できます。ベッドやソファの高さをさらに7.6cm調整したい場合は、家具の足の下に7.6 cmのライザー (Item-2) を4つ置くだけです。ベッドやソファの高さをさらに10.2cm調整したい場合は、4つの10.2 cmライザー (Item-3) のみを使用してください。ベッドまたはソファとさらに12cmを調整する場合は、7.6 cmのライザー (Item-2) を10.2 cmのライザー (Item-3) の上に積み重ねます。最後に、7.6 cmライザー (Item-2) と10.2 cmライザー (Item-3) をベッドとソファの両方で別々に使用できます。
3. 警告 : 7.6 cmライザー (Item-2) と10.2 cmライザー (Item-3) を混合しないでください。これにより、家具が傾いたり、家具の重量のバランスが不均一になったりして、ユーザーに重傷を負わせたり、家具を損傷したりする可能性があります。
4. 警告 : ライザーは常に家具の脚の真下と中央に配置してください。家具の脚が外縁やライザーではなく、フォームパッド上にあることを確認してください。そうしないと、家具がライザーから滑り落ちて、ユーザーに重傷を負わせる可能性があります。
5. 警告 : ライザーが木、タイル、および同様の床などの滑らかな床で滑るのを防ぐために、滑り止めのゴムストリップ (Item-4) が提供されています。一部のカーペットでは、滑り止めのゴムストリップ (Item-4) は必要ありません。
6. 警告 : 子供にジャンプさせたり、家具で遊んだりしないでください。ライザーを不適切に使用すると、ユーザーに重大な傷害を与えたり、家具を損傷したりする可能性があります。
7. 時々家具をチェックして、ライザーが家具の足の下に中央に正しく配置されていることを確認してください。