

## Recliner Risers

### インストールガイド :

フックとループの留め具を2つに分けます。1つのピースを半分にカットし (図1)、後で椅子のベースに取り付ける2つの5 cmのピース (C) を作成します。残りの留め具で、2つの1.9cmのストリップをカットします。残りは破棄します。図のように、粘着性の裏地をはがし、各ロッカーリミッターに置きます (D)。

椅子を横向きにします。左脚延長ハンドルが見えます (図2)。フラットヘッドドライバーを使用して、椅子のベースの各コーナーからプラスチック製のフロアプロテクターをこじ開けます。付属のネジを使用して、チェアリフトをチェアベースに取り付けます。リクライナーライザー (A) が前面にあり、リクライナーライザー (B) が背面にあることを確認します。また、ネジを取り付けるときは、リクライナーライザーが椅子にしっかりと固定されていることを確認してください。これにより、適切なフィットが保証されます。

ファスナー (C) を取り付けるチェアベースからほこりを取り除きます (図3)。接着剤の裏当てを取り外し、ベースの上部に貼り付けます。左側のロッカーアームのタブを持ち、取り付け部品 (C) に置きます。ネジは後で取り付けます。

注 : ロッカーリミッターを5 cmの移動ストリップに沿ってスプリングコンプレックスに近づけたり遠ざけたりすると、立ち上がったときに椅子が止まる場所が決まります。ユーザーの快適さをカスタマイズします。希望の設定が見つかったら、図のように穴にネジを入れます。

反対側の椅子を裏返します。椅子の反対側について、図2と図3の手順を繰り返します。今回はリクライナーライザー (B) が前面にあり、リクライナーライザー (A) が背面にあることを確認してください。

完了したら、椅子を直立位置に戻します。

スイベルチェアに関する注記 : ベースは、取り付ける前に通常のベースに変換する必要があります。ほとんどの椅子メーカーは小額の料金でこれを行います。

Stander Recliner Risersは、既存の椅子を維持しながら、人の生体力学的利点を高めるように設計されています。完全な股関節置換または特別な予防措置を伴うその他の病状のある患者は、医師または医療提供者によって確立された推奨ガイドラインに引き続き従う必要があります。