

組立説明：

1. パッケージからすべての部品を取り出し、図 1 に示すアイテムをよく理解してください。
注：図 2 は、2 つの異なる方法で使用される組み立て済み製品を示しています。一部の椅子、ラウンジャー、およびバッグでは、製品フレームを枕の上に配置する必要があります（クッションを取り外すことができないため）、一部の椅子、ラウンジャー、およびソファでは、製品フレームを枕の下に配置できます。
2. 製品を組み立てる前に、製品のフレームを枕の上に置くか、枕の下に置くかを決定します。次に、ハンドルの希望の高さと、椅子、ベッド、またはソファ用に組み立てられたフレームの幅と深さを決定します。
3. ハンドルアセンブリをサポートアセンブリに挿入し、ハンドルアセンブリを目的の高さに調整します。四角いヘッドボルトと丸いナットでハンドルアセンブリを固定します（図 3 を参照）。注：四角いネジ（四角い首のネジ）は常に四角い穴に組み立てられ、丸いナットは丸い穴に組み立てられます。事前にウェーブウォッシャーを丸ナットアセンブリにスライドさせます。
4. ベースチューブをサポートアセンブリに挿入します。ベースチューブを椅子、ラウンジャー、またはソファに合うフレームの深さに調整し、四角いボルトと丸いナットでベースチューブを固定します（図 4 を参照）。
5. ベースパイプをベース接続パイプに挿入します。ベースチューブを椅子、ラウンジャー、またはソファに合うフレーム幅に調整し、四角いボルトと丸いナットでベースチューブを固定します（図 5 を参照）。
6. 図 6 に示すように、製品を椅子、ベッド、またはソファに置き、スプリングピンを押して脚を床に合わせます。

安全上のご注意:

1. 製品の取り付けが不適切な場合、重大な怪我や損傷を引き起こす可能性があります。スタンダー株式会社安全な製品を提供し、事故を回避する方法についてユーザーを教育するよう努めています。
- ✓ 製品を定期的にチェックして、SquareBolts と RoundNuts が安全であることを確認してください。
 - ✓ 調整可能な脚が常に床に接触していることを確認してくださいこれはリスクが高いです。
 - ✓ 高リスクのユーザーには、精神的に無意識のユーザー（投薬中のユーザーを含む）、身長や体重の状態があるユーザー、または支援なしで製品を使用する能力に影響を与える状態のユーザーが含まれます。
 - ✓ これらの注意事項について懸念や質問がある場合は、StanderInc に連絡してください。1-800-506-9901 で。

2. 病気やけがをしたり、バランスや立ったり座ったりする能力を妨げる薬を服用している場合は、この製品を使用する前にまず医師に相談する必要があります。製品を適切に使用しないと、重大な怪我や損傷につながる可能性があります。
3. 製品は人の全重量を支えてはなりません。この製品は、座った状態と立った状態でのみバランスとサポートを提供することを目的としています。
4. 子供が製品にぶら下がったり、遊んだりすることは許可されていません。
5. 免責事項：Stander Inc.もメーカーも、製品の不適切な使用または組み立てによって発生または発生する可能性のある損傷または傷害について責任を負いません。

限定保証：

製の製品をご購入いただきありがとうございます。これにより、日常生活が楽になることを願っています。保護のために、次の保証書をお読みください。

Stander Inc.は、最初の購入者に対して、この製品に購入日から1年間、材料および/または製造上の欠陥がないことを保証します。

保証期間中、Stander Inc.は材料または製造上の欠陥を無料で修正します。ただし、元の購入者は送料を前払いする必要があります。すべての交換部品は新品であり、元の保証の残りの期間、または出荷日から30日間のいずれか長い方の期間保証されます。最初の購入者は、保証期間中に製造上の欠陥または材料の欠陥を書面でStander Inc.に通知する必要があります。この保証は譲渡できず、通常の使用にのみ適用されます。送料は返金されません。

保証の対象外は次のとおりです。

- 小売業者のオリジナルアイテムではない輸送中の損傷。☒不正な添付、変更、または修正によって引き起こされた損傷。
- 製品が意図された、設計された、または意図された目的以外の目的での製品の使用によって引き起こされた損傷。
- その他の乱用、乱用、乱用、または誤用によって引き起こされた損傷。

いかなる状況においても、Stander Inc.は、この限定保証の違反、契約の違反、または厳格な規制に起因する特別な、偶発的、または結果的な損害について責任を負いません。

この面の説明を超える保証はありません。明示的または黙示的を問わず、その他すべての保証（商品性または特定の目的への適合性に関するすべての黙示的保証を含む）のみが除外されます。

この保証はあなたに特定の法的権利を与えます、そしてあなたはまた州ごとに異なる他の権利を持っているかもしれません。

この保証の下でサービスを受けるには、Stander Inc.に連絡することができます。1-800-506-9901で。