

組立説明：

ステップ1：

図1に示すように、すべてのアイテムを箱から取り出し、平らな面に置きます。

図1に示すように、アイテム2、3、および4にカバーキャップ（アイテム-5）を取り付けます。

ステップ2：

ベースマウント（アイテム2）をカーブしたハンドル（アイテム1）に挿入し、穴を合わせてソケットを挿入します

頭ねじ（アイテム8）。

ソケットヘッドネジ（Item-8）をワッシャー（Item-7）に挿入し、ソケットヘッドネジを挿入します

カーブしたハンドル（アイテム-1）とベースマウント（アイテム-2）の位置合わせされた穴を通して。

ステップ3：

水平マウント（アイテム-4）をソケットヘッドネジ（アイテム-8）に合わせ、付属のアレンヘッドを使用します

ソケットヘッドネジを水平マウント（アイテム-4）のネジ端に締めるためのレンチ。

注：水平マウント（アイテム4）のねじ端は、

水平マウントチューブ。締める前に、ソケットヘッドネジの位置が合っていることを確認してください。

ソケットヘッドネジの位置が合っていない場合、ネジ山の端が損傷する可能性があります

水平マウント（アイテム-4）。

ステップ4：

トップマウント（アイテム-3）をカーブハンドル（アイテム-1）に挿入する前に、ピボットブッシング（アイテム-

6）トップマウント（アイテム-3）に。

注：ピボットブッシング（アイテム-6）の片側には、大きな半径（丸みを帯びた）エッジがあります。大きいスライド

最初の半径（丸め）側。

ステップ5：

カーブグラブバーを設置する場所を決定します。あなたが決定したら

場所、あなたは壁の後ろにスタッドを見つける必要があります。スタッドは長方形の木です壁を支える構造。スタッドは床に垂直で、スタッドの間隔は16です。

壁の後ろにインチ離れています。

8本の木ネジすべてがスタッドにしっかりと固定されていることが重要です。いくつかのオプションがあります

壁の後ろにスタッドを配置するために使用されます。

磁石を使用してください。壁は鋼の釘でスタッドに取り付けられています。磁石で壁をスキャンすると、

磁石が鋼の釘に引き付けられ、スタッドの中心がどこにあるかを示します。

ほとんどのホームセンターはスタッドロケーターを販売しています。

経験のある人に依頼するか、地元の請負業者にカーブグラブバーを設置してもらいます。

ステップ6：

スタッドを配置した状態で、鉛筆で垂直線を軽く描き、2つの中心線を表します。

カーブグラブバーが取り付けられるスタッド。組み立てたカーブグラブバーを誰かに持ってもらいます

図3の2つのマークされた穴、図4の下部の穴、上部の穴などの目的の場所

図5の穴はすべて、図2に示すように、スタッドの垂直中心線上にあります。

図3に示す2つの取り付け穴の位置を鉛筆で軽くマークします。これらの2つの取り付け穴は、スタッドの1つの中心線と一致している必要があります。また、鉛筆で3の場所をマークします

図4に示す取り付け穴。図5に示す3つの穴にはまだ印を付けないでください。

ステップ7：

壁からカーブグラブバーを取り外し、直径1/8インチのドリルビットで5つのマークされた穴を開けます

図3と図4に示すように、図4に示す角度の付いた穴は斜めに開けられていることを忘れないでください

スタッドの中心線に向かって。

ステップ8：

5つの穴を開けたら、組み立てたカーブグラブバーを希望の場所に持ってもらいます

図3と図4に示すように、5本のネジすべてをブラケットに配置してねじ込みます。曲線の後グラブバーは5本のネジで壁に固定され、図5に示す最後の3つの穴に印を付けます。

ステップ9：

トップマウント (Item-3) をカバーキャップ (Item-5) およびピボットブッシング (Item-6) と一緒に順番に取り外します

最後の3つの穴を開けます。図5に示す最後の3つの穴を開けたら、トップマウントを組み立て直します。

(Item-3)、カバーキャップ (Item-5)、およびピボットブッシング (Item-6) で、最後の3本のネジを上部にねじ込みます。

図5に示すように、(アイテム3) ブラケットを取り付けます。

ステップ10：

カバーキャップ (アイテム-5) を壁掛けブラケットの上にスライドさせ、軽い圧力で所定の位置にはめ込みます。

注：取り付けられたハンドルのわずかな動きは正常で安全です。この移動により、ロッキングピンを5つのユーザー位置に簡単にロックできます。

警告：この製品を使用する前に必ずお読みください。

1.カーブグラブバーが正しく取り付けられていないと、重傷を負ったり死亡する可能性があります。StandersInc.は

安全な製品を提供し、事故を防ぐ方法をユーザーに通知することをお約束します。

安全上のご注意：

□□カーブグラブバーを定期的にチェックして、壁にしっかりと固定されていることを確認します。

□□カーブグラブバーは、ハンドルを回転させてロックできるバネ付きピンを使用していますいくつかのユーザーポジション。を使用する前に、回転ハンドルがロック位置にあることを確認してください

製品。使用前に回転ハンドルがロックされていないと、転倒して重傷を負ったり、危害を及ぼす可能性があります。

□□リスクの高いユーザーには、追加の安全対策を講じる必要があります。高リスクユーザー精神的に意識のない人（投薬中の人を含む）、ユーザーを含む

サイズや体重の状態、またはカーブグラブを使用する能力を損なう状態のある人援助なしのバー。

□□カーブグラブバーの開口部に頭や腕を入れないでください。重傷または死亡の可能性があります
ます
結果。

□□これらの注意事項に関して懸念や質問がある場合は、次のスタンダーに連絡してください。
1-800-506-9901。

2.病気やけがに苦しんでいる場合、またはバランスに影響を与える薬を服用している場合、ま
たは

立ったり座ったりする能力がある場合は、この製品を使用する前にまず医師に相談する必要が
あります。の場合

製品が適切に使用されていない場合、重大な傷害または危害が生じる可能性があります。

3.この製品は、座ったり立ったりしながらバランスとサポートを提供するように設計されてい
ます。ぶら下げたり、

カーブグラブバーからスイングします。耐荷重は300ポンドの直接垂直重量です。

4.製品が適切に組み立てられるように、製品の指示に注意深く従う必要があります
配置されます。指示に従わないと、ユーザーに重傷を負う可能性があります。

製品。

5.子供が製品にぶら下がったり遊んだりしないようにしてください。

6.免責事項：Standers、Inc。も製造業者も、起こり得るいかなる危害または傷害についても責
任を負いません。

製品の不適切な使用または組み立ての結果または結果として生じたもの。

限定的保証

Standersブランド製品をご購入いただきありがとうございます。それがあなたの毎日を楽にす
ることを願っています

生活。保護のために、次の保証書をお読みください。

Standers、Inc。は、この製品に材料の欠陥がないことを最初の購入者に保証します

および/または購入日から1年間の技量。

保証期間中、Standers、Inc。は、材料または製造上の欠陥を修正します。

充電。ただし、最初の購入者は送料を前払いする必要があります。交換部品はすべて新品にな
ります

元の保証の残りの期間、または出荷日から30日間保証されます。

どちらか長い方。最初の購入者は、保証期間中にStanders、Inc。に書面で通知する必要があり
ます

技量または材料の欠陥の。この保証は譲渡できず、通常の使用のみを対象としています。

配送料は返金されません。

保証は以下をカバーしません：

□□小売業者への最初の出荷以外の出荷中の損傷。

□□不正な添付、変更、または修正によって引き起こされた損傷。

□□製品が使用された目的以外の目的で製品を使用したことによる損傷

設計または意図された。

□□その他の乱用、誤用、取り扱いの誤り、または誤用によって引き起こされた損傷。

いかなる状況においても、Standers、Inc。は、特別損害、偶発的損害、または結果的損害に対
して責任を負わないものとします。

この限定保証の違反、契約違反、または厳格責任に基づいています。

ここに記載されている内容を超える保証はありません。すべて

明示または黙示を問わず、その他の保証（のすべての黙示の保証を含む）

商品性または特定の目的への適合性)は、ここに否認されます。
一部の州では、黙示の保証の期間の制限が許可されていないため、上記の制限では許可されない場合があります。
あなたに適用します。この保証はあなたに特定の法的権利を与えます、そしてあなたはまた異なる他の権利を持っているかもしれません
州から州へ。
この保証の下でサービスを受けるには、ユタ州ローガンのカンターベリーサークル74番地にあるStandersInc。に連絡してください。
84321。