

## WALKER REPLACEMENT FRONT WHEELS™

### Gruppo ruota di ricambio

1. Rimuovere il bullone, il dado e la vecchia ruota dal camminatore esistente utilizzando la chiave a brugola inclusa. Nota: osservare la direzione assemblata del bullone e del dado prima di rimuoverli.
2. Sostituire la vecchia ruota con una nuova e rimontare il bullone e il dado come assemblati originariamente.

Assemblea  
stazionaria

Dado esistente

Bullone esistente

Chiave a brugola  
inclusa

